

Link do produktu: <https://amazonex.eu/ems-nakladki-gelowe-do-stymulatorow-2-szt-23060000793-p-716.html>



## EMS nakładki gelowe do stymulatorów 2 szt. [23060000793]

Cena	<b>6,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>793</b>
Kod producenta	<b>B28-300 (po30kpl.)</b>
Kod EAN	<b>5905274847939</b>

### Opis produktu

Żelowa nakładka, zapasowa nakładka żelowa absorbująca do EMS AB, akcesoria do trenowania mięśni brzucha - 10 szt. (pakowane po 2 szt.)

### Opis produktu

1. Zdejmij starą nakładkę żelową ze stymulatora.
2. Usuń ewentualne pozostałości.
3. Zdejmij z jednej strony niebieską folię z nowej nakładki (najlepiej nożykiem do tapet, przebijając folię przy krawędzi, podważając i odciągając lub paznokciem przy brzegu) .
4. Naklej nową nakładkę żelową w miejscu usuniętej.
5. Wygładź warstwę żelową, aby wyeliminować pęcherzyki powietrza.
6. Odłącz drugą przezroczystą folię (zdjętą folię możesz chronić nakładkę przed brudem gdy nie używasz stymulatora) .

Styl: Nakładka żelowa do EMS AB.

kolor: bezbarwny, przezroczysty

Materiał: nakładka żelowa samoprzylepna

rozmiar: 4 \* 6 cm

Zawartość opakowania:

10 szt. nakładek żelowych (pakowane hermetycznie po 2 szt.)

Wskazówki dotyczące konserwacji:

Przed użyciem upewnij się, że skóra pozostaje czysta i sucha. Zaleca się oczyszczenie skóry alkoholem przed użyciem, aby przedłużyć żywotność wkładki żelowej. Gdy wyraźnie poczujesz, że żel na nakładce stymulatora traci swoją przyczepność lub gdy powierzchnia klejąca wyschnie lub zabrudzi się, należy wymienić zamienną nakładkę na nową.

Tylko wymienione powyżej produkty, inne produkty nie są wliczone w cenę.